



Mund- und Naseschutz

Allgemeines und richtige Anwendung, Stand 29.04.2020


AURIA

Mund-Nase-Schutz – Allgemeines



- **Mund-Nase-Schutz dann tragen, wenn die Abstandsregeln nicht sicher eingehalten werden kann.**
- **Bereiche, in denen Mund-Nase-Schutz verwendet werden müssen, sind gekennzeichnet.**
- **Der Mund-Nase-Schutz kann anderen Maßnahmen nicht ersetzen.**
Mund-Nase-Schutz ist nur eine zusätzliche Maßnahme!
- **Masken werden von Auria gestellt. Gegebenenfalls sind Arbeiten zu unterlassen.**
- **Masken sind persönliche Gegenstände, wie eine Zahnbürste.**
- **FFP-Masken sind für die Produktion vorbehalten, um dort Kolleginnen und Kollegen vor Emissionen zu schützen!**
- **Masken sind verboten, wenn Sie Euch maßgeblich behindern – wie etwa beim Autofahren.**



Mund-Nase-Schutz – Verwendung

Anlegen

1. Herstellerhinweise beachten
2. Hände waschen vor dem Anlegen
3. Innenseite der Maske nicht anfassen und sauber halten
4. Maske locker vor Mund, Nase und Wangen platzieren
5. Maske mit Bändern an den Ohren fixieren
6. Sitz der Maske korrigieren
7. Maske, wenn möglich abdichten. Atmen muss weiter gut möglich sein



Tragen

1. Maske nicht anfassen
2. Wenn die Maske durchfeuchtet ist → ablegen (andernfalls können Bakterien/Pilze wachsen)
3. Höchsttragedauer: 1 Schicht



Ablegen und Entsorgung

1. Maske von den Ohren lösen und nach vorne abnehmen, Stoffteil nicht anfassen
2. Einmalmasken als „kontaminiertes Material“ entsorgen
3. Masken zur Mehrfachverwendung wegpacken (Beutel, ...), zu Hause trocknen, bei mindestens 60 °C waschen oder intensiv heiß bügeln.
4. Nach Verwendung Hände waschen



Quelle: Hinweise des BfArM zur Verwendung von [...] Medizinischem Mund-Nasen-Schutz (MNS) ...
<https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html>